

**AFFINIS<sup>®</sup>**  
PERFEKCYJNE WYCISKI



**BLACK**  
Z MIŁOŚCIĄ DO SZCZEGÓŁÓW

 **COLTENE**



# NADZWYCZAJNA CZYTELNOŚĆ


Nowy, czarny materiał do łyżek AFFINIS heavy body BLACK EDITION pozwala osiągnąć wraz ze złotym lub srebrnym materiałem AFFINIS PRECIOUS doskonałą czytelność wycisku.

Unikalne połączenie kolorów umożliwia jeszcze dokładniejsze odwzorowanie szczegółów i pomaga w ocenie jakości wycisku.

**Widoczna precyzja z miłością do szczegółów.**

Unikalna srebrna i złota pigmentacja znacznie redukuje efekt odbijania światła, a czytelność jest jeszcze lepsza dzięki maksymalnemu kontrastowi kolorów.


## AFFINIS® PRECIOUS

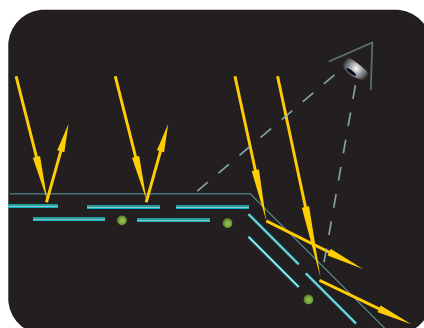

Wypełniacz ●  
AFFINIS® PRECIOUS pigmenty —


Płytkowa struktura wypełniacza, przypominającego zwierciadło, redukuje odbijanie światła na powierzchni, co prowadzi do lepszego kontrastu i większej czytelności.

## Standardowa masa wyciskowa

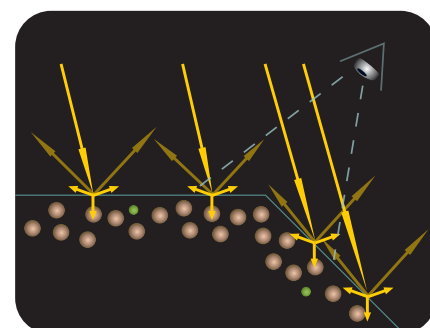

Wypełniacz ●  
Standardowe pigmenty ●

Nieregularna struktura standardowych wypełniaczy powoduje nieuporządkowane odbijanie światła na powierzchni, czego rezultatem jest mniejszy kontrast i gorsza czytelność.

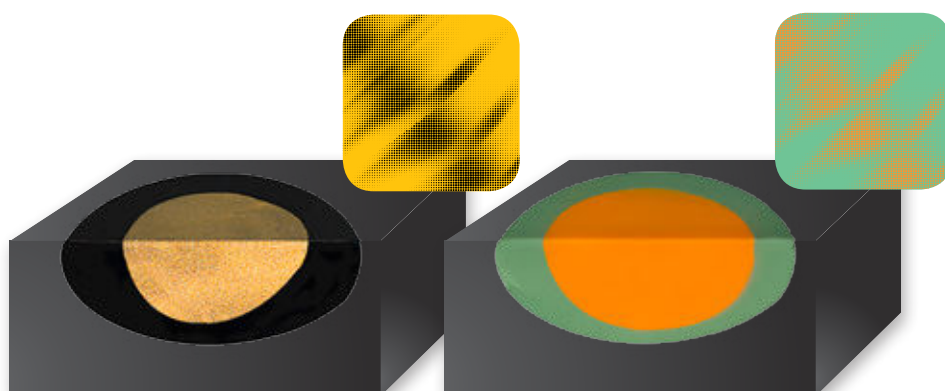

# DOSKONAŁE ZAPŁYWANIE


Masy „wash” **AFFINIS®** PRECIOUS wykazują kąt przylegania wynoszący tylko 10°. Doskonałe zapływanie umożliwia łatwe odwzorowanie przez masę wyciskową wszystkich istotnych szczegółów w wilgotnych warunkach jamy ustnej. Wyjątkowe

powinowactwo powierzchniowe zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza i zniekształceń na krawędziach.

**Dla perfekcyjnych wycisków.**




## Początkowe powinowactwo do powierzchni na wilgotnej zębinię

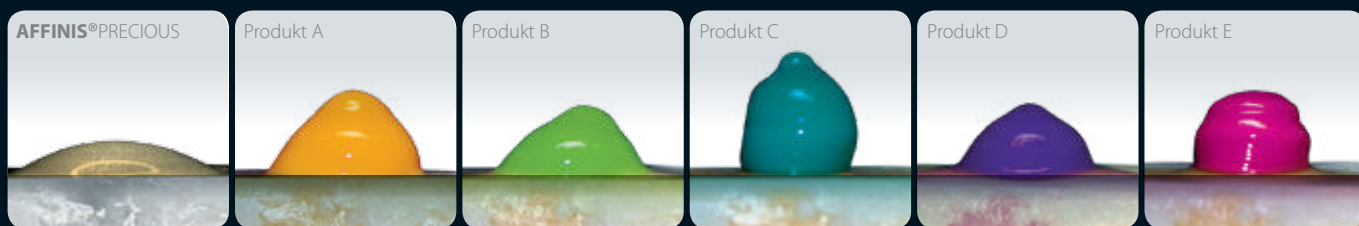

Określona ilość materiału na powierzchni wilgotnej zębiny po 10 s.

**AFFINIS®** PRECIOUS stworzono, by umożliwić osiągnięcie najlepszych rezultatów w jamie ustnej i laboratorium. Dzięki wilgotności materiału mokry gips łatwo napływa do wycisku, pozwalając na odlanie idealnego modelu. Dobrze wykonany model umożliwia technikowi stworzenie precyzyjnej, pasującej odbudowy.


## **AFFINIS®** PRECIOUS regular body

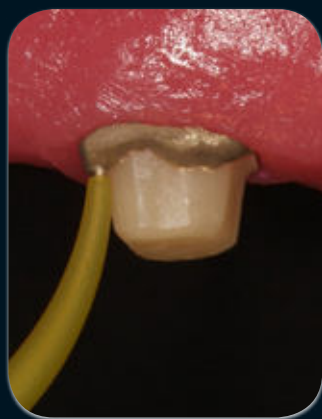

**AFFINIS®** PRECIOUS splywa bezpośrednio do bruzdy, zapobiegając powstawaniu pęcherzyków powietrza.



Właściwości tiksotropowe zapobiegają splywaniu.

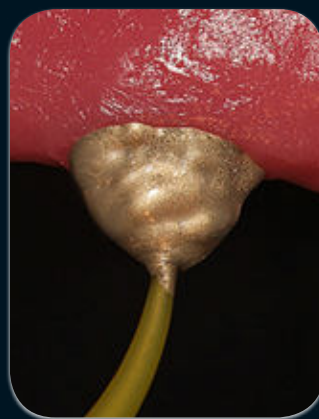

Samokonturująca konsystencja i środek powierzchniowy czynny o dużej aktywności wytwarzają innowacyjne powinowactwo do wilgotnej struktury zęba.



Masy „wash” **AFFINIS®** PRECIOUS umożliwiają uzyskanie dokładnych wycisków bez pęcherzyków powietrza.

# AFFINIS®

PERFEKCYJNE WYCISKI

BLACK EDITION

## AFFINIS® heavy body

- Opakowanie pojedyncze

2 x 75 ml heavy body BLACK EDITION  
8 x końcówki mieszające

2 x 75 ml = 4 WYCISKI

6001 9554



## AFFINIS® Zestaw próbny 1

2 x 75 ml heavy body BLACK EDITION  
2 x 50 ml PRECIOUS light body/regular body  
1 x tłok 75 ml

6001 9555

Z  
TŁOKIEM

## AFFINIS® Zestaw próbny 2

2 x 75 ml heavy body BLACK EDITION  
2 x 50 ml PRECIOUS light body/regular body  
1 x dozownik 75 ml

6001 9638

Z  
DOZOWNI-  
KIEM



© 2015 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com



affinis.coltene.com

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstr. 20  
9450 Altstätten/Szwajcaria  
Tel. +41 71 757 53 00  
Faks +41 71 757 53 01  
info.ch@coltene.com

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls  
Ohio 44223/USA  
Tel. +1 330 916 8800  
Faks +1 330 916 7077  
info.us@coltene.com



 **COLTENE**